

MASCARILLA SUBLIMADA ELÁSTICA REUTILIZABLE



Medidas desplegada: 34x13 cm.

Para uso personal en adultos.

Altamente resistente, hasta 25 lavados.

Se aconseja lavar como mínimo a 60°C.

Fabricada según norma UNE 0065.

Disponible certificación REACH.

Soft Shell. 95% Poliéster/ 5% Elastano

Los materiales empleados en la elaboración de la mascarilla disponen de **certificado OEKO-TEX**, certificando así que no haya sustancias nocivas ni en textiles ni en las fases de fabricación. Además, dispone de **certificación Clase 1** que sólo se otorga a los productos certificados OEKO-TEX que son aptos para un uso prolongado en contacto con la piel, no generando ningún tipo de escozor o enrojecimiento.

¿COMO LAVAR CORRECTAMENTE LAS MASCARILLAS?



En la **lavadora lo recomendable es que se lave a unos 60°** en un ciclo normal de una hora. Se puede **lavar a mano con legía muy diluida (1:50)**. También se pueden utilizar productos virucidas, existe una lista de productos autorizados del gobierno (Ministerio de sanidad).

¿COMO COLOCARSE LA MASCARILLA CORRECTAMENTE?

Con las manos lavadas correctamente, sitúala en la cara en la posición en la que te sientas cómodo **por encima de la nariz, estirando las gomas por detrás de las orejas**. La parte inferior debe estar colocada debajo de la barbilla. Retira la mascarilla a la inversa.



¿COMO QUITARSE LA MASCARILLA PERSONALIZADA CORRECTAMENTE?

Lávate primero las manos con jabón. **Retírala con los pulgares sin tocar la parte frontal**. **Posteriormente deberás lavarla con jabón antes de volver a colocarla**.